

Návod na použitie



Pred použitím skontrolujte neporušenosť plastového obalu.

Ak je obal poškodený, produkt nepoužívajte.

1. Otvorte masku a nasadte nosovú opierku na mostík nosa
2. Umiestnite masku na bradu a stiahnite gumičky k ušiam, upravte ich, až kým budú sedieť pohodlne.
3. Nosovú opierku prispôbte tvaru nosa.
4. Zatlačte obidvoma ukazovákmi na sponu na nose, aby ste zaistili pevné obopnutie a zabránili úniku vzduchu.

Informatívna poznámka:

Tento výrobok nie je odolný voči ohňu a nemá by sa používať v priestoroch s otvoreným ohňom.

Pre správne použitie masky postupujte opatrne podľa ilustračných obrázkov a skontrolujte úroveň príľnavosti k tvári.

Nenoste poškodenú masku v podmienkach novej nákazy / vírusu. Použite novú masku.

Ak je počas používania nevyhnutné masku zložiť, zabráňte kontaktu s rukami / nosom / ústami a vonkajším povrchom masky, aby ste predišli novej nákaze.

Jednorazová maska, nepoužívajte opakovane.

Keď masku vyhadzujete, zložte ju smerom von do stredu a zlikvidujte ju v netriedenom odpade vložením do plastového vrečka.

Maska je schopná filtrovať niektoré kontaminanty, ale nesprávne použitie môže spôsobiť nákazu a následné ochorenie až smrť. Materiály v priamom kontakte s pokožkou môžu spôsobiť alergickú reakciu u určitých precitlivených osôb.

Typ: FFP2 NR - EN 149: 2001 + A1: 2009 - na jedno použitie / nesterilné

Podmienky skladovania: uchovávať v tmavých, suchých a dobre vetraných podmienkach, mimo dosahu otvoreného ohňa a zdrojov znečistenia.

Čas použiteľnosti: 3 roky od dátumu výroby

Prečítajte si informačnú poznámku / Na jedno použitie - nepoužívajte opakovane / Podmienky skladovania - teplotný rozsah -10 až +50°C / Podmienky skladovania - maximálna relatívna vlhkosť vzduchu 90% / Neuvoľňuje sa do životného prostredia / Chráňte pred otvoreným ohňom

